

REINIGUNGS- UND PFLEGEPLAN FÜR ABSAUGGERÄTE

Monat/Jahr

Monat/Jahr			Geräte-Bezeichnung					Serien-Nr.					
Tag	Reinigung	Reinigung	Reinigung	Austausch	Austausch	Austausch	Austausch	Austausch	Reinigung/Austausch Zubehörteile vorgenommen durch:				
	Sekret- behälter	Deckel	Gehäuse	Bakterienfilter (Tracheolino® / Tracheoport®)	Bakterienfilter- scheibe (Tracheofirst®)	Fingertip	Absaug- schlauch	Verbindungs- schlauch	Name	Unterschrift			
1	täglich, nach jedem Absaugvorgang	täglich	mind. 1x wöchentlich										
2													
3													
4													
5													
6													
7								wechseln					
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14								wechseln					
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21								wechseln					
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29							wechseln	wechseln	wechseln	wechseln	wechseln		
30													
31													

Wichtige Hinweise zur Handhabung, Reinigung und Pflege von Absauggeräten
 Beim Umgang mit Absauggeräten ist eine besondere Sorgfalt einzuhalten. Eine tägliche Sichtkontrolle des Gerätes auf äußere Beschädigungen und Verschmutzungen ist unerlässlich. Absauggeräte sind stets entsprechend der Gebrauchsanleitung des Geräteherstellers zu betreiben. In der Gebrauchsanleitung finden sich auch Empfehlungen des Herstellers zur Reinigung und Pflege des Absauggerätes, die zu beachten sind. Falls eine Gerätedesinfektion erforderlich ist, sollte diese nur mit den vom Hersteller genannten Mitteln erfolgen, um Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden. Je nach Einsatz des Gerätes, z. B. im pflegerischen Bereich, sind vor Beginn des Absaugens zusätzliche Schutzvorkehrungen zu treffen, um die Sicherheit von Patient, Anwender und Dritten nicht zu gefährden. Hierzu zählt beispielsweise die gründliche Händedesinfektion und das Tragen von Einmalhandschuhen. Zum Absaugen sind ausschließlich spezielle ste-

rile Absaugkatheter zum Einmalgebrauch zu benutzen. Bei jedem Absaugvorgang ist stets ein neuer Absaugkatheter zu verwenden. Das Absaugsystem (Sekretbehälter, Absaugschlauch) ist nach Gebrauch sofort zu reinigen, d. h. zu leeren und anschließend gründlich mit Leitungswasser durchzuspülen. Auf eine hygienische Aufbewahrung des Absauggerätes ist zu achten! Der Absaugschlauch ist in die Schlauchhalterung des Absauggerätes einzuhängen, um eine Verschmutzung zu vermeiden. Bei den in der Tabelle angegebenen Reinigungs- und Wechselintervallen handelt es sich lediglich um unverbindliche Empfehlungen. Im Einzelfall können hier andere, auch kürzere Reinigungs- und Austauschintervalle indiziert sein.

Achtung! Das Absauggerät ist ein Einpatientenprodukt und darf nur an einem Patienten verwendet werden, da sonst Infektionsgefahr besteht.

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH
 August-Horch-Straße 4a · D-51149 Köln · Phone +49(0)22 03/29 80-0
 Fax +49(0)22 03/29 80-100 · Germany · mail vertrieb@fahl.de · www.fahl.de

TIPPS ZUR REINIGUNG UND PFLEGE VON ABSAUGGERÄTEN

Um die Funktionsfähigkeit des Absauggerätes zu gewährleisten, sollten einige Reinigungs- und Pflegehinweise beachtet werden. Bei den Reinigungs- und Austauschintervallen für verschiedene Geräteteile, die im Reinigungs- und Pflegeplan genannt werden, handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die auf Grundlage eigener Erfahrungen sowie den Vorgaben der jeweiligen Gerätehersteller getroffen wurden.

Grundsätzlich ist bei der Reinigung von Absauggeräten zu beachten:

- Vor jedem Reinigen immer erst den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen!
- Vor dem erstmaligen Reinigen Gebrauchsanleitung des Geräteherstellers durchlesen!

Reinigung des Sekretbehälters

Den Sekretbehälter nach jedem Absaugvorgang ausschütten und gründlich spülen. Festsitzendes Sekret ggfs. mit einer handelsüblichen Flaschenbürste entfernen.

Reinigung des Deckels

Der Sekretbehälterdeckel sollte nach jedem Gebrauch, mindestens jedoch einmal täglich unter fließendem Wasser gespült werden. Hierzu ist es erforderlich, dass vorher der Bakterienfilter und die Geräteschläuche entfernt werden. Nun können Sie den Sekretbehälterdeckel vom Sekretbehälter abziehen. Stärkere, festsitzende Verunreinigungen können mit einer weichen Bürste oder einem Tuch abgewischt werden. Auch ein Einweichen in warmem Wasser ist hier hilfreich.

Überprüfen Sie nach der Reinigung die Unversehrtheit und die richtige Befestigung der Überlaufsicherung. In der Gebrauchsanleitung des Geräteherstellers befindet sich zumeist eine Skizze, mit deren Hilfe Sie erkennen können, wie die einzelnen Teile der Überlaufsicherung richtig verbunden werden.

Reinigung des Gehäuses

Das Gehäuse des Absauggerätes sollte in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal wöchentlich mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Keinesfalls

ein nasses Tuch benutzen oder das Gerät unter fließendem Wasser abspülen!! Das Gerät könnte hierdurch erheblich beschädigt werden und dadurch den Anwender in Gefahr bringen.

Bakterienfilterscheibe/Bakterienfilter

Bei Absauggeräten, die mit Filterscheibe (z.B. Tracheofirst®) ausgerüstet sind, befindet sich das Filterblättchen im Gehäuse des Sekretbehälterdeckels. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir die Filterscheibe alle sieben Tage zu wechseln. Das Filtergehäuse lässt sich mit einer leichten Drehbewegung öffnen.

Bei Absauggeräten mit kreiselförmigem Bakterienfilter (z.B. Tracheolino®, Tracheoport®) befindet sich der Filter zwischen beiden Verbindungsschläuchen zum Absauggerät. Der Filter soll das Eindringen von Wasser und Bakterien in das Geräteinnere verhindern. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir einen Wechsel des Bakterienfilters im Abstand von 4 Wochen. Bei nassem oder verschmutztem Filter ist ein sofortiger Austausch erforderlich, damit die Funktion des Gerätes nicht beeinträchtigt wird.

Schlauchverbinder/Fingertip

Der Fingertip verbindet den Absaugschlauch mit dem sterilen Stoma-Katheter (Absaug-Katheter). Da der Fingertip bei jedem Absaugvorgang mit Trachealsekret in Berührung kommt, empfehlen wir aus hygienischen Gründen einen Austausch einmal im Monat vorzunehmen.

Absaugschlauch

Der lange Absaugschlauch nimmt das Trachealsekret auf, das durch den Stoma-Katheter gelangt, und leitet die Absaugflüssigkeit über die Öffnung am Rand des Sekretbehälterdeckels, in der sich der Schlauchadapter befindet, in den Sekretbehälter weiter.

Der Absaugschlauch muss nach jedem Absaugvorgang mit klarem Wasser durchgespült werden, damit keine Sekretreste im Schlauch verbleiben und diesen verunreinigen. Nach dem Absaugen wird der benutzte Stoma-Katheter abgezogen. Anschließend wird das Gerät nochmals eingeschaltet und der lange Absaugschlauch mit dem Schlauchverbinder/Fingertip an der Spitze in sau-

beres Wasser gehalten. Wenn das Wasser den Absaugschlauch durchspült hat und der Sekretbehälter etwa insgesamt bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, kann der Spülvorgang beendet werden. Bitte achten Sie darauf, dass der Sekretbehälter nicht überfüllt wird.

Durch häufiges Absaugen verfärben sich die Kunststoffschläuche trotz regelmäßiger Reinigung und können mit der Zeit porös werden. Dadurch können sich leicht Bakterien in den Schläuchen ansiedeln. Aus diesem Grund empfehlen wir, den Absaugschlauch etwa alle 4 Wochen gegen einen neuen Schlauch auszutauschen.

Verbindungsschlauch

Der Verbindungsschlauch führt vom Sekretbehälterdeckel zu einem Stutzen am Gehäuse des Absauggerätes.

Auch beim Verbindungsschlauch empfehlen wir einen Austausch im Abstand von 4 Wochen, da sich nicht ausschließen lässt, dass Absaugflüssigkeit/Bakterien durch den Filter hindurch in den Schlauch gelangen, z. B. nach einem Übersaugen/Überfüllen des Gerätes.

Desinfektion von Geräteteilen

Sekretbehälter (-glas), Sekretbehälterdeckel und andere Geräteteile lassen sich bei den meisten Absauggeräten auskochen oder mit speziellen Desinfektionslösungen desinfizieren. Bitte beachten Sie hier die Angaben des jeweiligen Geräteherstellers in der Gebrauchsanleitung zum Absauggerät.

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a · D-51149 Köln · Phone +49(0)22 03/29 80-0
Fax +49(0)22 03/29 80-100 · Germany · mail vertrieb@fahl.de · www.fahl.de