

Duracuff® Clip

Adapter zur Arretierung der Innenkanüle

In Verbindung mit dem Clip ist damit der Einsatz folgender Duracuff® Trachealkanülen mit Innenkanüle bei beatmeten Patienten möglich:

Duracuff® UNI Trachealkanülen

mit Niederdruckmanschette, mit zwei Innenkanülen
(in den Ausführungen REF 13002, 13102, 13202)

Duracuff® SUCTION Trachealkanülen

mit Niederdruckmanschette, mit zwei Innenkanülen
(in den Ausführungen REF 13032, 13132, 13232)

Bei Nicht-Verwendung des Duracuff® Clips dürfen für beatmete Patienten nur folgende Kanülenvarianten (ohne Innenkanüle) verwendet werden:

Duracuff® UNI Trachealkanülen

mit Niederdruckmanschette ohne Innenkanüle
(in den Ausführungen REF 13000, 13100, 13200)

Duracuff® Suction

mit Universalaufsatz ohne Innenkanüle
(in den Ausführungen REF 13040, 13140, 13240)



Duracuff® Clip

Adapter zur Arretierung der Innenkanüle



DKK-FL Duracuff Clip 08/08

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a · D-51149 Köln · Telefon 0 22 03/29 80-0
Fax 0 22 03/29 80-100 · e-mail vertrieb@fahl.de · Postfach 92 03 44 · 51153 Köln

www.fahl.de

FAHL

Neu!

Duracuff® Clip

Adapter zur Arretierung der Innenkanüle



ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

Duracuff® Clip

Adapter zur Arretierung der Innenkanüle

Bei der mechanischen Beatmung war bisher der Einsatz der Kanülenvariante Duracuff® Kanüle mit Innenkanüle wegen der Gefahr einer Diskonnektion ausgeschlossen. Mit dem Duracuff® Clip zur Arretierung der Innenkanüle ist die Fixierung der Innenkanüle möglich, so dass auch Duracuff® Trachealkanülen mit Innenkanüle während der mechanischen Beatmung eines Patienten eingesetzt werden können.

Der Duracuff® Clip zur Arretierung der Innenkanüle ist bei allen Duracuff® Trachealkanülen mit Innenkanülen zu verwenden, wenn Patienten mechanisch beatmet werden!


Der Duracuff® Clip wird vor Beginn der mechanischen Beatmung an der Duracuff® Trachealkanüle angebracht. Er sichert die Innenkanüle durch die Arretierung mit der Außenkanüle und verhindert so ein versehentliches Loslösen der Innenkanüle.

Die Innenkanüle lässt sich schnell und einfach in die Außenkanüle einführen; fest verankert ist die Innenkanüle an der Außenkanüle jedoch erst, wenn die Haltezacken der Innenkanüle den Easy Lock 6-Kant-Anschluss der Außenkanüle fest umschließen.



Duracuff® Clip

Adapter zur Arretierung der Innenkanüle

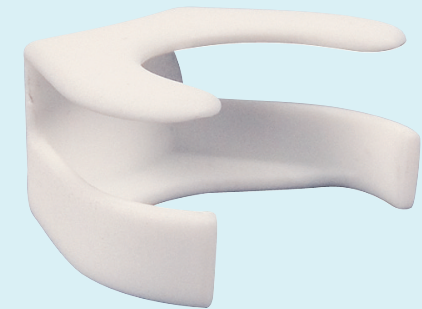

Bestellhinweis:

▶ Duracuff® Clip

Adapter zur Arretierung der Innenkanüle,
einzeln unsteril verpackt

HMV 12.99.99.0003

Art.-Nr./REF 13299

ANDREAS FAHL
MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH