

# REINIGUNGS- UND PFLEGEPLAN FÜR BEATMUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR

Monat/Jahr:

Geräte-Bezeichnung:

Serien-Nr.:

Tag	Gänsegurgel Wechsel 1x täglich	Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher für Beatmung (HME) Wechsel 1x täglich, bei Bedarf öfter	Beatmungsschlauch Wechsel 1x wöchentlich	Bakterienfilter für Beatmungsgerät Wechsel 1x wöchentlich	Luftreinlaßfilter Beatmungsgerät grob Wechsel 1x monatlich	Luftreinlaßfilter Beatmungsgerät fein Wechsel 1x wöchentlich	Luftreinlaßfilter O <sub>2</sub> -Konzentrator Wechsel 1x wöchentlich	Vernebler-set Wechsel 1x täglich	Bakterienfilter für Inhalationsgerät Wechsel 1x wöchentlich	Schlauchsystem für Atembefeuchter Wechsel 1x wöchentlich	SIMV-Ventil Wechsel 1x täglich	Dauer-Absaugkatheter Wechsel 1x täglich	Verbindungsschlauch für Absauggerät Tracheofirst® Wechsel 1x täglich	Absaugschlauch für Absauggerät Tracheofirst® Wechsel 1x täglich	Ersatzfilterscheiben für Absauggerät Tracheofirst® Wechsel 1x täglich	Reinigung/ Austausch Zubehörteile vorgenommen durch Unterschrift
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																

**Wichtige Hinweise zur Handhabung, Reinigung und Pflege von Beatmungsgeräten**

**Gebrauchsanweisung/Bedienungsanleitung beachten:** Das Beatmungsgerät nebst Zubehör darf ausschließlich von Fachpersonal betrieben werden, das unter Berücksichtigung der Gebrauchsanweisung des Herstellers von autorisierten Personen in die sachgerechte Handhabung der Medizinprodukte eingewiesen wurde. Das Beatmungsgerät darf nur gem. Herstellerangaben bestimmungsgemäß angewendet werden.

**Instandhaltung:** Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. Wartung, Reparaturen) dürfen ausschließlich vom Gerätehersteller oder von autorisierten Fachfirmen vorgenommen werden.

**Sicherheitstechnische Kontrollen:** Gem. § 6 i.V.m. Anlage 1 MPBereibV sind für Beatmungsgeräte regelmäßige sicherheitstechnische Kontrollen nach Vorgabe des Herstellers, spätestens jedoch alle 2 Jahre durchzuführen.

**Zubehör:** Es ist ausschließlich das in der Bedienungsanleitung beschriebene Originalzubehör des Herstellers zu verwenden.

**Kein Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen:** Das Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen.

**Gefahrlose Kopplung mit elektrischen Geräten:** Elektrische Kopplung mit Geräten, die nicht in der Gebrauchsanweisung erwähnt sind, nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den Hersteller.

**Gewährleistung/Haftung:** Werden Gebrauchs-, Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Herstellers und/oder Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgetauscht oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jegliche Gewährleistung und Haftung des Herstellers und/oder Verkäufers für einen hieraus entstandenen Mangel bzw. Schaden.

**Vorsichtsmaßnahmen:** Geräte nur gemäß einer ärztlichen Verordnung mit den vom Arzt bestimmten Einstellwerten und Überwachungsmodalitäten verwenden. Bei assistierter Beatmung die möglichen Risiken von Hyperventilation beachten! Gerät nicht zusammen mit entflammenden Gasen bzw. Narkosemitteln verwenden, Brandgefahr!

**Schadstoffe in der Raumluft vermeiden!** In der Regel sollten Beatmungsgeräte aus Sicherheitsgründen nur mit geeigneten Filtersystemen betrieben werden. Beachten Sie hier die Vorgaben des Herstellers.

**Wechselintervalle für Zubehör:** Bei den in der Tabelle angegebenen Reinigungs- und Wechselintervallen handelt es sich lediglich um unverbindliche Empfehlungen der Fahl GmbH. Im Einzelfall können hier andere, auch kürzere Reinigungs- und Austauschintervalle indiziert sein. Beachten Sie hier die Herstellerangaben!

**Achtung!** Das Beatmungsgerät ist ein Einpatientenprodukt und darf nur an einem Patienten verwendet werden, da sonst Infektionsgefahr besteht.

ANDREAS FAHL

MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4a · D-51149 Köln · **Telefon 0 22 03/29 80-0**  
Fax 0 22 03/29 80-100 · e-mail [vertrieb@fahl.de](mailto:vertrieb@fahl.de) · Postfach 92 03 44 · 51153 Köln

Zweigstelle Berlin

Hennigsdorfer Str. 126-128 · D-13503 Berlin · **Telefon 0 30/43 74 89-21**  
Telefax 0 30/43 74 89-23 · e-mail [vertrieb@fahl.de](mailto:vertrieb@fahl.de) · **www.fahl.de**

*www.fahl.de*