

# REINIGUNGS- UND PFLEGEPLAN „EXTRA“ FÜR ABSAUGGERÄTE

Monat/Jahr:  Geräte-Bezeichnung:  Serien-Nr.:

Tag	Reinigung	Reinigung	Reinigung	Austausch	Austausch	Austausch	Austausch	Reinigung/Austausch Zubehörteile vorgenommen durch:				
	Sekretbehälter	Deckel	Gehäuse	Bakterienfilter	Fingertip	Absaugschlauch 1,30 m	Verbindungs- schlauch	Name	Unterschrift			
1	täglich, nach jedem Absaugvorgang	täglich	täglich, nach jedem Absaugvorgang									
2				wechselln	wechselln							
3												
4												
5								wechselln				
6												
7												
8							wechselln	wechselln				
9												
10												
11								wechselln				
12												
13												
14							wechselln	wechselln				
15												
16												
17								wechselln				
18												
19												
20							wechselln	wechselln				
21												
22												
23								wechselln				
24												
25												
26								wechselln				
27												
28							wechselln					
29								wechselln	wechselln	wechselln		
30												
31												

## Wichtige Hinweise zur Handhabung, Reinigung und Pflege von Absauggeräten

Beim Umgang mit Absauggeräten ist eine besondere Sorgfalt einzuhalten. Eine tägliche Sichtkontrolle des Gerätes auf äußere Beschädigungen und Verschmutzungen ist unerlässlich.

Absauggeräte sind stets entsprechend der Gebrauchsanleitung des Geräteherstellers zu betreiben. In der Gebrauchsanleitung finden sich auch Empfehlungen des Herstellers zur Reinigung und Pflege des Absauggerätes, die zu beachten sind. Falls eine Gerätedesinfektion erforderlich ist, sollte diese nur mit den vom Hersteller genannten Mitteln erfolgen, um Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden.

Je nach Einsatz des Gerätes, z. B. im pflegerischen Bereich, sind vor Beginn des Absaugens zusätzliche Schutzvorkehrungen zu treffen, um die Sicherheit von Patient, Anwender und Dritten nicht zu gefährden. Hierzu zählt beispielsweise die gründliche Händedesinfektion und das Tragen von Einmalhandschuhen.

Zum Absaugen sind ausschließlich spezielle sterile Absaugkatheter zum Einmalgebrauch zu benutzen. Bei jedem Absaugvorgang ist stets ein neuer Absaugkatheter zu verwenden.

Das Absaugsystem (Sekretbehälter, Absaugschlauch) ist nach Gebrauch sofort zu reinigen, d. h. zu leeren und anschließend gründlich mit Leitungswasser durchzuspülen.

Auf eine hygienische Aufbewahrung des Absauggerätes achten! Der Absaugschlauch ist in die Schlauchhalterung des Absauggerätes einzuhängen, um eine Verschmutzung zu vermeiden.

Bei den in der Tabelle angegebenen Reinigungs- und Wechselintervallen handelt es sich lediglich um unverbindliche Empfehlungen. Im Einzelfall können hier andere, auch kürzere Reinigungs- und Austauschintervalle indiziert sein.

**Achtung! Das Absauggerät ist ein Einpatientenprodukt und darf nur an einem Patienten verwendet werden, da sonst Infektionsgefahr besteht.**

**ANDREAS FAHL**


**MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH**

August-Horch-Straße 4a · D-51149 Köln · **Telefon 0 22 03/29 80-0**  
 Fax 0 22 03/29 80-100 · e-mail vertrieb@fahl.de · Postfach 92 03 44 · 51153 Köln

# GEBRAUCHSANLEITUNG SCHLAUCH- UND FILTER-SET „EXTRA“

## Tipps zur Reinigung und Pflege von Absauggeräten

Um die Funktionsfähigkeit des Absauggerätes zu gewährleisten, sollten einige Reinigungs- und Pflegehinweise beachtet werden. Bei den Reinigungs- und Austausch-Intervallen für verschiedene Geräteteile, die im Reinigungs- und Pflegeplan genannt werden, handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die auf Grundlage eigener Erfahrungen sowie den Vorgaben der jeweiligen Gerätehersteller getroffen wurden.

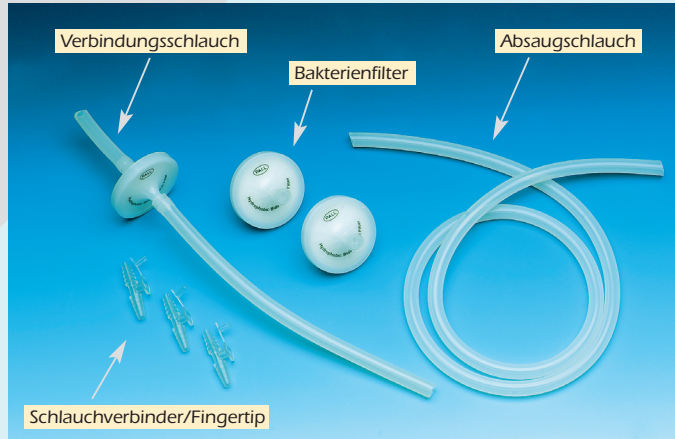

Schlauch- und Filter-Set „Extra“

Grundsätzlich ist bei der Reinigung von Absauggeräten zu beachten:

- ▶ Vor jedem Reinigen immer erst den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen!
- ▶ Vor dem erstmaligen Reinigen Gebrauchsanleitung des Geräteherstellers durchlesen!

## Reinigung des Sekretbehälters

Den Sekretbehälter nach jedem Absaugvorgang ausschütten und gründlich spülen. Festsitzendes Sekret ggfs. mit einer handelsüblichen Flaschenbürste entfernen.

## Reinigung des Deckels

Der Sekretbehälterdeckel sollte nach jedem Gebrauch, mindestens jedoch einmal täglich unter fließendem Wasser gespült werden. Hierzu ist es erforderlich, dass vorher der Bakterienfilter und die Geräteschläuche entfernt werden. Nun können Sie den Sekretbehälterdeckel vom Sekretbehälter (-glas) durch eine leichte Drehbewegung abziehen. Stärkere, festsitzende Verunreinigungen können mit einer weichen Bürste oder

einem Tuch abgewischt werden. Auch ein Einweichen in warmem Wasser ist hier hilfreich.

Überprüfen Sie nach der Reinigung die Unversehrtheit und die richtige Befestigung der Überlaufsicherung. In der Gebrauchsanleitung des Geräteherstellers befindet sich zumeist eine Skizze, mit deren Hilfe Sie erkennen können, wie die einzelnen Teile der Überlaufsicherung richtig verbunden werden.

## Reinigung des Gehäuses

Das Gehäuse des Absauggerätes sollte in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal wöchentlich mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Keinesfalls ein nasses Tuch benutzen oder das Gerät unter fließendem Wasser abspülen! Das Gerät könnte hierdurch erheblich beschädigt werden und dadurch den Anwender in Gefahr bringen.

## Bakterienfilter

Bei Absauggeräten mit kreiselförmigem Filter (Bakterienfilter) befindet sich der Filter in der Regel zwischen zwei Verbindungsschläuchen zum Absauggerät. Der Filter soll das Eindringen von Wasser und Bakterien in das Geräteinnere verhindern. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir den Bakterienfilter etwa einmal wöchentlich auszutauschen. Bei nassem oder verschmutztem Filter ist ein sofortiger Austausch erforderlich, damit die Funktion des Gerätes nicht beeinträchtigt wird.

## Schlauchverbinder/Fingertip

Der Fingertip verbindet den Absaugschlauch mit dem sterilen Stoma-Katheter (Absaug-Katheter). Da der Fingertip bei jedem Absaugvorgang mit Trachealsekret in Berührung kommt, empfehlen wir aus hygienischen Gründen einen Austausch im Abstand von 2-3 Tagen.

## Absaugschlauch, 1,30 m

Der lange Absaugschlauch nimmt das Trachealsekret auf, das durch den Stoma-Katheter gelangt, und leitet die Absaugflüssigkeit über einen Stutzen am Sekretbehälterdeckel in den Sekretbehälter weiter.

Der Absaugschlauch muss nach jedem Absaugvorgang mit klarem Wasser durchgespült werden, damit keine Sekretreste im Schlauch verbleiben und diesen verunreinigen. Am einfachsten ist es, nach dem Absaugen ein Spülglas mit sauberem Wasser bereitzustellen. Dann werden der benutzte Stoma-Katheter und der Fingertip abgezogen. Anschließend wird das Gerät nochmals eingeschaltet und die Spitze des langen Ab-

saugschlauches in das Spülglas mit Wasser gehalten. Wenn das saubere Wasser den Absaugschlauch durchspült hat und das Sekretglas etwa insgesamt bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, kann der Spülvorgang beendet werden. Bitte achten Sie darauf, dass der Sekretbehälter nicht überfüllt wird.

Durch häufiges Absaugen verfärben sich die Kunststoffschläuche trotz regelmäßiger Reinigung und können mit der Zeit porös werden. Dadurch können sich leicht Bakterien in den Schläuchen ansiedeln. Aus diesem Grund empfehlen wir, den Absaugschlauch etwa alle 4 Wochen gegen einen neuen Schlauch auszutauschen.

## Verbindungsschläuche, 28 cm und 5 cm

Der Verbindungsschlauch mit 28 cm Länge wird auf den Sekretbehälterdeckel aufgesteckt. Anschließend wird der Bakterienfilter angebracht und mit dem zweiten kurzen Verbindungsschlauch so verbunden, dass er zwischen den Verbindungsschläuchen liegt. Das freie Ende des Verbindungsschlauchs wird anschließend am Gehäusestutzen des Gerätes aufgesteckt.

Auch bei den Verbindungsschläuchen empfehlen wir einen Austausch im Abstand von 4 Wochen, da sich nicht ausschließen lässt, dass Absaugflüssigkeit/Bakterien durch den Filter hindurch in den Schlauch gelangen, z. B. nach einem Übersaugen/Überfüllen des Gerätes.

## Desinfektion von Geräteteilen

Sekretbehälter (-glas), Sekretbehälterdeckel und andere Geräteteile lassen sich bei den meisten Absauggeräten auskochen oder mit speziellen Desinfektionslösungen desinfizieren. Bitte beachten Sie hier die Angaben des jeweiligen Geräteherstellers in der Gebrauchsanleitung zum Absauggerät.

## Bestellhinweis:

- ▶ Schlauch- und Filter-Set „Extra“ **Art.-Nr. 60420**  
bestehend aus:
  - 1 Absaugschlauch, 1,30 m
  - 1 Verbindungsschlauch, 28 cm
  - 1 Verbindungsschlauch, 5 cm
  - 5 Bakterienfilter
  - 1 Schlauchverbinder/Fingertip, steril, (Packung mit 10 Stück)

## ANDREAS FAHL

## MEDIZINTECHNIK-VERTRIEB GMBH

August-Horch-Straße 4 a · D-51149 Köln · **Telefon 0 22 03/29 80-0**  
Fax 022 03/29 80-100 · e-mail [vertrieb@fahl.de](mailto:vertrieb@fahl.de) · Postfach 92 03 44 · 51153 Köln