

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel



STERILE R CE 0482



STERILE R CE 0482

- ▶ Steriles, farbloses Gleitmittel auf Wasserbasis
- ▶ Das FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel dient dem leichteren Einführen insbesondere von Trachealkanülen in das Tracheostoma
- ▶ Eine kleine Menge Gleitmittel wird mit Hilfe eines sauberen und fusselfreien Vliestuchs vorsichtig auf der Trachealkanüle verrieben, welche dann wie gewohnt in das Tracheostoma eingesetzt werden kann
- ▶ Auch für Trachealkanülen mit Innenkanüle zu verwenden: das Einreiben der Innenkanüle mit dem Gleitmittel erleichtert die Einführung in die Außenkanüle
- ▶ Die Pflegehinweise des jeweiligen Kanülenherstellers sollten vor dem erstmaligen Gebrauch des Gels jedoch unbedingt beachtet werden
- ▶ Sparsame Anwendung: schon ein paar Tropfen FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel genügen, um die Außen-/Innenkanüle leichter einzuführen
- ▶ Erhältlich als 20 g Tube (REF 36100) oder in praktischen 3 g Sachets (REF 36105) zum Einmalgebrauch ideal für unterwegs und auf Reisen
- ▶ Inhaltsstoffe: Gereinigtes Wasser, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Imidazolidinyl Harnstoff, Propylenglykol, Aspartam, Dinatrium-EDTA

Bestellhinweis:

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel, 20 g Tube

REF 36100

FAHL® OPTIFLUID® Lubricant Gel, 3 g Sachet

Packung mit 100 Stück

REF 36105