
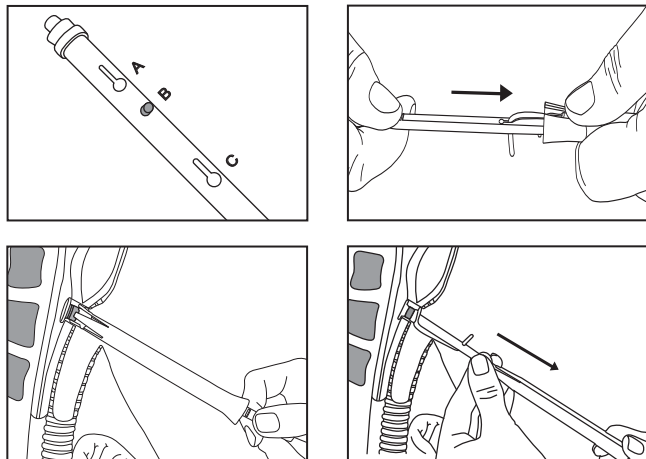


LARYVOX® INSERTER

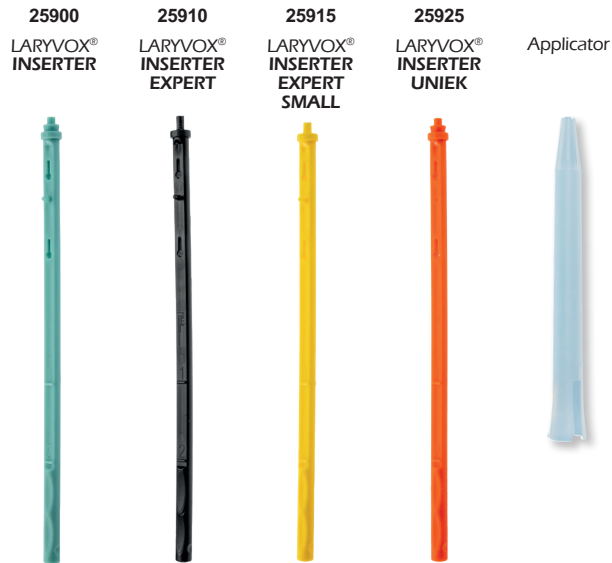

- ▶ De **LARYVOX® INSERTER** bestaat uit een plaatsingsinstrument en een applicator. Hij dient voor een optimale anterograde plaatsing of het vervangen van een shuntventiel / stemprothese:
 - **REF 25900:** voor stemprothesen met een schachtlengte van 5-14 mm
 - **REF 25910:** voor 16 Fr. stemprothese en/of een Blom-Singer® DUAL VALVE shuntventiel (20 Fr.)
 - **REF 25915:** voor stemprothesen met een schachtlengte van 4 mm
 - **REF 25925:** voor **LARYVOX® UNIEK** stemprothese/shuntventiel
- ▶ Het plaatsingsinstrument beschikt over twee (**REF 25925**) resp. drie verschillende bevestigingsmogelijkheden voor het eenvoudig en veilig plaatsen van verschillende typen stemprothesen.
- ▶ De applicator maakt eenvoudig inbrengen van het shuntventiel mogelijk en is in een paar stappen voor te bereiden
- ▶ De afgeronde applicatorpunt bevordert bovendien een zachte plaatsing en maakt het vervangen van de stemprothese zo comfortabel mogelijk.

BESTELINFORMATIE

- ▶ Applicator
- ▶ Gebruiksaanwijzing

LARYVOX® INSERTER 1 x plaatsingsinstrument (turkoois)	REF 25900
of LARYVOX® INSERTER EXPERT 1 x plaatsingsinstrument (zwart)	REF 25910
of LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL 1 x plaatsingsinstrument (geel)	REF 25915

Stemprothese is niet in de leveromvang inbegrepen en moet apart besteld worden. Neem de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de desbetreffende stemprothese in acht!

De sets van de stemprothese **LARYVOX® UNIEK** (**REF 25010** en **25020**) bevatten:

LARYVOX® INSERTER UNIEK 1 x plaatsingsinstrument (oranje)	REF 25925
---	------------------

Product	VE	REF
LARYVOX® INSERTER	1 stuk	25900
LARYVOX® INSERTER EXPERT	1 stuk	25910
LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL	1 stuk	25915
LARYVOX® INSERTER UNIEK	1 stuk	25925







Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH is de exclusieve distributeur voor Blom-Singer® producten in geselecteerde Europese landen. Blom-Singer® is een geregistreerd handelsmerk van Freudenberg Medical, LLC.



LARYVOX® INSERTER25920
LARYVOX®
INSERTER
SPECIAL

Gel capsules

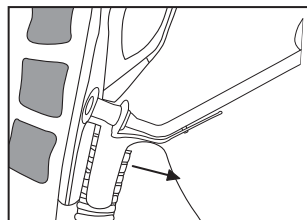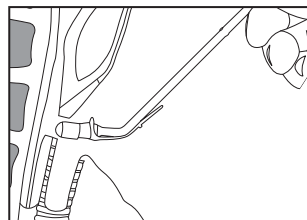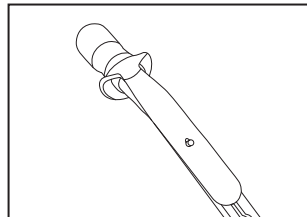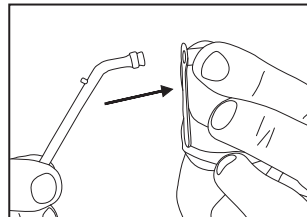

- ▶ De **LARYVOX® INSERTER SPECIAL** dient voor een optimale anterograde plaatsing of het vervangen van een shuntventiel / stemprothese met behulp van de gel-capsuletechniek bij:
 - diep geplaatste of schuin verlopende fistels
 - een vernauwd fistelkanaal
 - een uiterst kleine tracheostoma, voor de optimalisering van de zichtbaarheid
- ▶ Het plaatsingsinstrument beschikt heeft een veilige bevestigingsmogelijkheden voor het eenvoudig en veilig plaatsen van verschillende typen shuntventielen met een diameter van 20 French vanaf 5 mm te plaatsen
- ▶ Door gebruik te maken van de gel-capsuletechniek kan de stemprothese moeiteloos worden ingebracht
- ▶ Met behulp van de gelcapsule wordt het shuntventiel op atraumatische wijze in het shuntkanaal ingebracht
- ▶ Direct voor het plaatsen kan een druppel wateroplosbaar plaatselijk anestheticum worden aangebracht om het oplossen van de gelcapsule in de slokdarm te versnellen
- ▶ De bijpassende gelcapsules zijn apart verkrijgbaar in de maten 20 Fr. en 22 Fr.

BESTELINFORMATIE

- ▶ Gebruiksaanwijzing

LARYVOX® INSERTER SPECIAL REF 25920
1 x plaatsingsinstrument (blauw)

Optionele accessoires:
**BLOM-SINGER® REPLACEMENT
GEL CAPS** REF BE3X9X
Vervangende gel capsules

Shuntventiel is niet in de leveromvang inbegrepen en moet apart besteld worden. Neem de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het desbetreffende shuntventiel in acht!

Product	VE	REF
LARYVOX® INSERTER SPECIAL	1 stuk	25920













Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH is de exclusieve distributeur voor Blom-Singer® producten in geselecteerde Europese landen. Blom-Singer® is een geregistreerd handelsmerk van Freudenberg Medical, LLC.










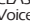
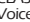
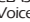
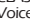
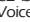

















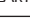


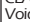







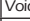
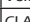



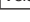

LARYVOX® INSERTER

OPDRACHT

25900	25910	25915	25920	25925
LARYVOX® INSERTER	LARYVOX® INSERTER EXPERT	LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL	LARYVOX® INSERTER SPECIAL	LARYVOX® INSERTER UNIEK
Kleur				
				
				

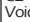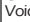Let van tevoren op de lengte (xx) van de te plaatsen stemprothese.

REF	Benaming	Lengte	INSERTER
20 FRENCH			
AD20xx-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
AD2004-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
AS20xx-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
AS2004-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
DV20xx-LF	DUAL VALVE Indwelling LF 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
DV20xx-NS	DUAL VALVE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN2004-NS	CLASSIC Indwelling 4 mm 20 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN20xx-NS	CLASSIC Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-20 mm	
IN2004-LEF	CLASSIC Indwelling LEF 4 mm 20 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN20xx-LEF	CLASSIC Indwelling LEF 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN20xx-IR	CLASSIC Indwelling IR 20 Fr. Voice Prosthesis	06-12 mm	
IN2004-LEIR	CLASSIC Indwelling LEIR 20 Fr. 4 mm Voice Prosthesis	04 mm	
IN20xx-LEIR	CLASSIC Indwelling LEIR 20 Fr. Voice Prosthesis	06-08 mm	
IN20xx-LESL	CLASSIC Indwelling LESL 20 Fr. Voice Prosthesis	05 und 07 mm	
IN2004-LETO	TEP Occluder Indw. LETO 20 Fr. 4 mm Voice Prosthesis	04 mm	
IN20xx-LETO	TEP Occluder Indw. LETO 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN2004-LF	CLASSIC Indwelling LF 20 Fr. 4 mm Voice Prosthesis	04 mm	
IN20xx-LF	CLASSIC Indwelling LF 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN20xx-SL	CLASSIC Indwelling SL 20 Fr. Voice Prosthesis	05,07 und 09 mm	
IN20xx-SO	CLASSIC Indwelling STERIL 20 Fr. Voice Prosthesis	08-14 mm	
25020-xx	LARYVOX® Uniek U.L.R.	05-13 mm	
25010-xx	LARYVOX® Uniek U.L.R.	05-13 mm	

REF	Benaming	Lengte	INSERTER
16 FRENCH			
AS1604-NS	ADVANTAGE Indwelling 16 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
AS16xx-NS	ADVANTAGE Indwelling 16 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN1604-NS	CLASSIC Indwelling 4 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN16xx-NS	CLASSIC Indwelling 6 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	06-20 mm	
IN16xx-SO	CLASSIC Indwelling STERIL 10 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	08-14 mm	
IN16xx-IR	CLASSIC Indwelling IR 16 Fr. Voice Prosthesis	06-12 mm	
IN1604-LEF	CLASSIC Indwelling LEF 4 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN16xx-LEF	CLASSIC Indwelling LEF 16 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN16xx-LESL	CLASSIC Indwelling LESL 16 Fr. Voice Prosthesis	05 und 07 mm	
IN1604-LETO	CLASSIC Indwelling LETO 4 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN16xx-LETO	CLASSIC Indwelling LETO 16 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN1604-LF	CLASSIC Indwelling LF 4 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN16xx-LF	CLASSIC Indwelling LF 16 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN16xx-SL	CLASSIC Indwelling SL 16 Fr. Voice Prosthesis	05,07 und 09 mm	
IN16xx-SO	CLASSIC Indwelling STERIL 16 Fr. Voice Prosthesis	08-14 mm	
Gebruik met gelpasuletechniek			
IN20xx-NS	CLASSIC Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-20 mm	
AD20xx-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
AS20xx-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN20xx-LF	CLASSIC Indwelling LF 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN20xx-LEF	CLASSIC Indwelling LEF 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN20xx-SL	CLASSIC Indwelling SL 20 Fr. Voice Prosthesis	05,07 und 09 mm	
IN20xx-LEIR	CLASSIC Indwelling LEIR 20 Fr. Voice Prosthesis	05 und 07 mm	
IN20xx-LESL	CLASSIC Indwelling LESL 20 Fr. Voice Prosthesis	05 und 07 mm	
IN20xx-IR	CLASSIC Indwelling IR 20 Fr. Voice Prosthesis	06-12 mm	
IN20xx-LETO	TEP Occluder Indw. LETO 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	



Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH is de exclusieve distributeur voor Blom-Singer® producten in geselecteerde Europese landen. Blom-Singer® is een geregistreerd handelsmerk van Freudenberg Medical, LLC.