

LARYVOX® EXTRA HME - CASSETTE



LARYVOX® EXTRA
HME



LARYVOX® EXTRA
HME MEDIUM



LARYVOX® EXTRA
HME HighFlow

Uw distributeur:
 **MDS B.V.**
Ebweg 1B • 2991 LS Barendrecht
NL - Nederland • Tel: +31 (0)50 - 569 0038
mail info@mdsbv.com • www.mdsbv.com

Local branch Berlin
Am Borsigturm 62
13507 Berlin - Germany
Phone +49 (0) 30/43 73 139-0
Fax +49 (0) 30/43 73 139-35

Local branch Munich
Aurbacher Straße 2
81541 Munich - Germany
Phone +49 (0) 89/58 90 90 9-0
Fax +49 (0) 89/58 90 90 9-20

Overseas branch Austria
Triester Straße 14 / office building 2
2351 Wiener Neudorf - Austria
Phone +43 (0) 22 36/89 28 38-0
Fax +43 (0) 22 36/89 28 38-14

Overseas branch Switzerland
Cherstrasse 4
8152 Glattbrugg - Switzerland
Phone +41 (0) 448293060
Fax +41 (0) 448293061

REF 90109-NL • FB222101 DOK FL LARYVOX® EXTRA HME NL 10/2018

FAHL

LARYVOX® EXTRA HME - CASSETTE



DE NIEUWE GENERATIE HME

ONOPVALLEND DESIGN MET SPREEKFUNCTIE

 **Andreas Fahl**
Medizintechnik-Vertrieb GmbH
August-Horch-Str. 4a
51149 Cologne - Germany
Phone +49 (0) 22 03/29 80-0
Fax +49 (0) 22 03/29 80-100
mail info@fahl.de
www.fahl.de


LARYVOX® EXTRA HME (Heat-Moisture Exchanger) vult het LARYVOX® SYSTEEM aan als vijfde generatie HME-cassette en biedt alle functies van een conventionele HME. Het filtert, verwarmt en bevochtigt de ingeademde lucht. De LARYVOX® EXTRA HME heeft een onopvallend ontwerp en is uitgerust met een eenvoudig te bedienen spreekoptie voor gebruikers met een stemprothese. Dankzij drie verschillende versies kan LARYVOX® EXTRA HME worden geselecteerd op basis van individuele activiteiten en vereisten. De HighFlow-versie is bijvoorbeeld vanwege de verminderde ademweerstand bijzonder geschikt voor situaties met grotere fysieke inspanning.

FILTEREN - VERWARMEN - BEVOCHTIGEN


Het filtermedium dat is geïntegreerd in de behuizing van de LARYVOX® EXTRA HME, zorgt voor het uitwisselen van warmte en vocht en filtert de ademlucht. Vanwege het verlies van de neusademhaling dienen filtratie, opwarming en bevochtiging van de ademlucht worden gewaarborgd om irritatie van de luchtwegen te voorkomen als gevolg van droge lucht, stof of schadelijke stoffen. Na de operatie hebben patiënten met tracheotomie / laryngectomie vaak last van verhoogde slijmproductie en irritatie van de luchtwegen in verband met de drang om te hoesten. Deze symptomen kunnen de ademhaling en de spraalrevalidatie belemmeren. Regelmatig gebruik van een HME-cassette verlicht deze symptomen en verbetert de kwaliteit van leven. Een HME-cassette is uitsluitend bedoeld voor éénmalig gebruik en moet uiterlijk na 24 uur worden vervangen, of vaker indien de cassette is vervuild door bijvoorbeeld slijm. De LARYVOX® EXTRA HME kan zowel overdag als 's nachts worden gedragen.

LARYVOX® EXTRA HME is beschikbaar in drie verschillende versies:


- NORMAL** ▶ normale ademweerstand voor situaties met lichte fysieke inspanning
- MEDIUM** ▶ medium ademweerstand voor gebruik bij fysieke activiteiten
- HIGHFLOW** ▶ verminderde ademweerstand voor situaties met grotere fysieke inspanning

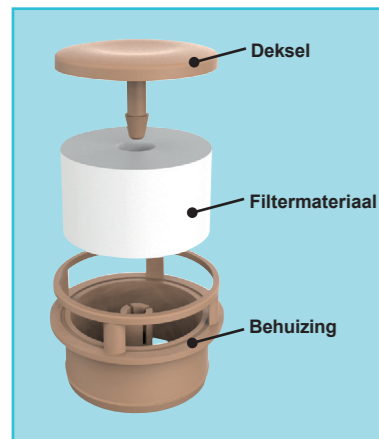

NORMAL versie

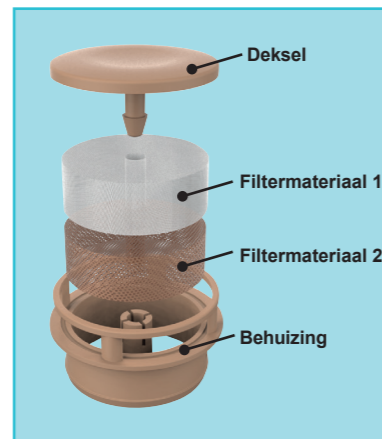

MEDIUM versie

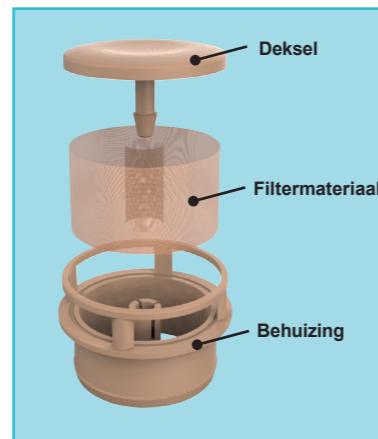

HIGHFLOW versie

Het verschil tussen de drie versies wordt bepaald door de verschillende schuimmateriaalen en het filtermedium. De standaardversie LARYVOX® EXTRA HME is geschikt voor patiënten onmiddellijk na laryngectomie in situaties met licht fysieke inspanning. LARYVOX® EXTRA HME Medium heeft gemiddelde ademweerstand en kan dus worden gebruikt voor situaties met lichamelijke activiteiten. Een HighFlow-versie is bovendien beschikbaar. Vanwege de lage ademweerstand is deze versie met name geschikt voor situaties met grotere fysieke inspanning en voor nieuwe HME-gebruikers.

ONOPVALLEND DESIGN EN MAKKELIJK IN GEBRUIK


De LARYVOX®EXTRA HME bestaat uit een huidkleurige kunststof behuizing en een vlakke deksel. Dankzij dit neutrale ontwerp is de HME-cassette onopvallend te dragen. Luchtopeningen aan de zijkant zorgen voor een ongehinderde luchtstroom, zelfs als de cassette is bedekt met bijvoorbeeld kleding of een stomabeschermer. De HME-cassette kan worden geplaatst op elk type stomapleister zoals de LARYVOX®Tape of een Laryngectomy-canule zoals de LARYNGOTEC® Tube met HME-aansluiting. Een rand om de behuizing maakt het makkelijk en snel de HME snel te verwijderen in geval van een hoestbui of voor de stomaverzorging.

EENVOUDIGE SPREEKOPTIE VOOR GEBRUIKERS MET EEN STEMPROTHESE


De ronde uitsparing in het deksel van LARYVOX® EXTRA HME maakt de optimale vingerpositie snel vondbaar. Door lichte vingerdruk uit te oefenen op het deksel van de HME-cassette doelgericht en precies worden afgesloten. Dit kan zelfs door de bedekkende kleding heen.

ZONDER HINDERLIJKE BIJGELUIDEN


Het deksel en de behuizing van de HME sluiten optimaal op elkaar aan door een speciaal sluitmechanisme. De HME is dus bijzonder goed afgesloten, waardoor onbedoeld luchtverlies vanaf de zijkant en daarmee gepaard gaande bijgeluiden worden voorkomen.

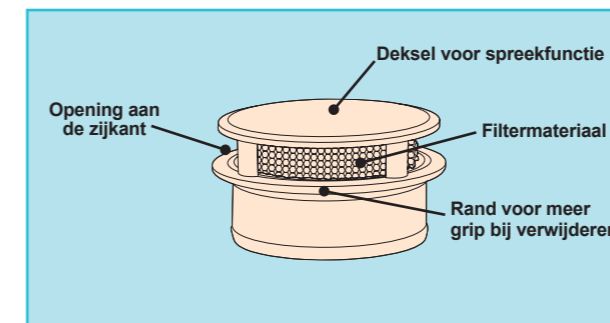


Ontwerp van de LARYVOX® EXTRA HME

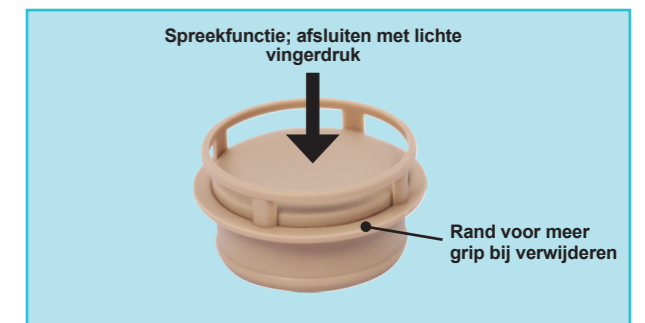

Efficiënte sluiting van de stoma en makkelijke snelle verwijdering dankzij de grip rand

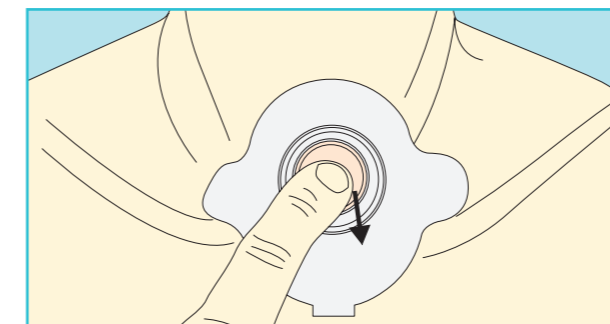

Het uitvoeren van de spreek functie (indrukken)

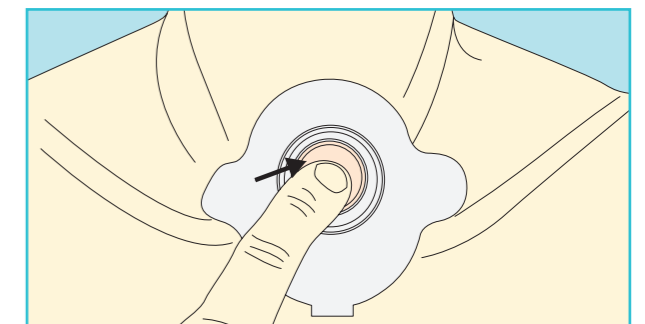

De HME functie gebruiken (loslaten)

ORDER INFORMATION:

- ▶ LARYVOX® EXTRA HME, Verpakking van 30 stuks
- ▶ LARYVOX® EXTRA HME MEDIUM, Verpakking van 30 stuks
- ▶ LARYVOX® EXTRA HME HighFlow, Verpakking van 30 stuks

REF 49860

REF 49862

REF 49861