



LARYVOX® PRO HME / PRO HME HIGHFLOW

- ▶ HME mit hygienischem Fingerschluss und hermetischem Verschlussmechanismus um das Sprechen zu ermöglichen
- ▶ Die Sprechaste wird durch einen Haltebügel geführt, um einen gleichmäßigen Verschluss des HMEs sicherzustellen, selbst wenn der Finger nicht 100% zentriert angesetzt wird
- ▶ Die Führung durch den Haltebügel verhindert darüber hinaus, dass das HME durch den Druck gequetscht wird und verringert dadurch weitestgehend die Extrusion (das Ausdrücken) von Flüssigkeit/Sekret
- ▶ Sehr gute Haptik, d.h. das Erreichen der Verschlussposition ist durch einen Stoppunkt (Klickpunkt) sehr gut fühlbar
- ▶ Ein besonderer Verschlussmechanismus am Boden des HMEs (auf der gegenüberliegenden Seite der Sprechaste) ermöglicht eine hermetische Abdichtung, um eine einwandfreie Sprechoption zu ermöglichen und schützt den Filter vor Sekretabsonderungen. Diese Funktion kann den täglichen Bedarf an Filterkassetten reduzieren.
- ▶ Die Atemluft strömt durch frontale und seitliche Öffnungen, so dass LARYVOX® PRO HME selbst durch die Kleidung hindurch betätigt werden kann
- ▶ Ein Fingerfalz am Gehäuse ermöglicht ein einfaches und schnelles Entfernen des HMEs (z.B. beim Husten)
- ▶ Ein 22 mm Adapter (KOMBI) ermöglicht den Anschluss an alle herkömmlichen Basisplatten (z.B. LARYVOX® TAPE) oder Silikonkanülen für Laryngektomierte (z.B. LARYNGOTEC®)
- ▶ Zwei Varianten: Standard und HighFlow für verringerten Atemwiderstand

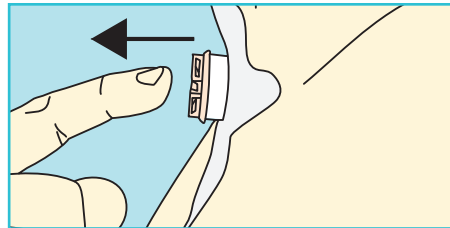

Nicht zur Wiederverwendung

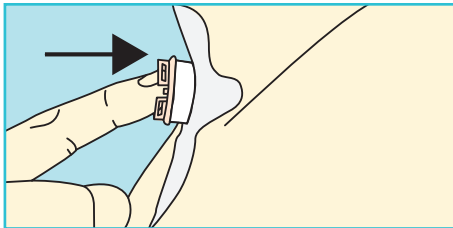

Trocken aufbewahren



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichnung

Bestellhinweis:

LARYVOX® PRO HME, Verpackung mit 30 Stück

LARYVOX® PRO HME HighFlow, Verpackung mit 30 Stück

REF 49841

REF 49840